

Arthrodesen-Stuhl *XXL*

Gebrauchsanleitung

Garantie

Wir gewähren auf dieses Produkt eine 5-jährige Garantie gemäß unseren Garantiebestimmungen. Ausgenommen sind Teile, die durch unsachgemäße Nutzung beschädigt wurden, sowie Verschleißteile wie Laufrollen, Bezugsstoffe und Kunstleder. Bei Mehrschichtnutzung reduziert sich die Garantietzeit entsprechend.

Pflege von Polstern

Nachlässigkeit ist der häufigste Grund für einen vorzeitigen Verfall von Polstern. In Abhängigkeit vom Einsatzort der Stühle kann sich feiner Schmutz, Staub und Sand auf der Polsteroberfläche ansammeln. Durch Bewegung, die durch die Benutzung des Stuhls entsteht, dringen Partikel in die Struktur des Stoffes ein, was zu verstärkter Reibung und Abnutzung der Polster führt. Durch regelmäßiges Absaugen der Polster kann frühzeitigen Materialermüdungen vorgebeugt werden.

Kunstleder- und PU-Polster sollten regelmäßig mit einem weichen Tuch und warmen Wasser mit Seifenlauge gereinigt werden. Dabei muss beachtet werden, dass der Stuhl anschließend trocken abgewischt wird und kein überschüssiges Wasser in Ritzen/Fugen eintritt.

Öl- und lösungsmittelhaltige Reiniger greifen das Kunstleder an und können zu Verfärbungen und Beschädigung führen. Für oberflächliche Schäden, die durch aggressive Reinigungsmittel hervorgerufen wurden, übernehmen wir keine Haftung.

Zum Einsatz von Desinfektionsmitteln lassen Sie sich bitte individuell von uns beraten.





Bedienung Stuhl

1. Stufenlose Sitzhöhenverstellung

Den Hebel sitzend betätigen. Anschließend Sitz mit Körpergewicht belasten (Einstellung runter) oder entlasten (Einstellung hoch).

2. Justierung Federkraft für Permanentkontakt

Durch drehen der Einstellschraube können Sie den Rückenlehnen-andruck fester (nach rechts) oder leichter (nach links) einstellen.

3. Handrad Rückenneigung | Permanentkontakt

Durch dieses Handrad arretieren oder lösen Sie die neigbare Rückenlehne. So können Sie Ihre gewünschte Rückenneigeposition fest einstellen, oder die Permanentkontakt-Funktion des Stuhls nutzen.

4. Handrad Rückenhöhenverstellung

Durch lösen des Handrads kann der Rückenlehnenstab circa 10 cm nach oben oder unten verschoben werden. Ist die gewünschte Rückenhöhe erreicht, muss das Rad wieder festgedreht werden.

5. Handräder Arthrodeseneinstellung

Durch lösen/festziehen des linken oder rechten Handrads, können Sie die jeweilige vordere Sitzfläche abklappen und so an Ihre Bein-Anatomie anpassen.



Bedienung Armlehnen

6. Tiefenverstellung der Armlehnen

Durch nach vorne- oder hinten-drücken der Armlehnenauflage lässt sich diese in der Tiefe verstellen.

7. Höhenverstellung der Armlehnen

Durch drücken des Tasters entriegelt sich die Höheneinstellung der jeweiligen Armlehne. Nach loslassen des Knopfes rastet die Armlehne in der eingestellten Position wieder ein.

Warnhinweise:

- Austausch und Arbeiten im Bereich des Sitzhöhenverstell-elementes nur durch Fachpersonal!
- Drehstühle sind Sitzmöbel und nicht als Steighilfe oder Leitersersatz zu benutzen!
- Für Stuhlrollen gilt die Regel: Weiche Rollen für harte Böden, harte Rollen für weiche Böden!